

## Insamling av dammprov med DUSTREAM™ för allergenbestämning

1. Sätt i en ny dammsugarpåse i dammsugaren. Detta bör göras för att inte orsaka överhettning om dammpåsen är full.
2. Ta bort munstycket/borsten från dammsugarröret.
3. Stoppa in nylonfiltret i provtagaren DUSTREAM
4. Sätt på provbehållaren på dammsugarslangen, med filtret riktat utåt.
5. Om provtagaren inte passar direkt på dammsugarslangen kan man använda den röda adaptern mellan provtagaren och slangen, med den sida som passar slangen bäst. Sätt sedan på provtagaren på adaptern.
6. Sätt på dammsugaren på medelstyrka.
7. Dammsug under 2-4 minuter över ytan på madrassen, mattan, stoppade stolen eller dylikt som skall undersökas. Skulle överhettning av dammsugaren ske stäng av och låt svalna innan du fortsätter dammsugningen.
8. Alternativt dammsugs en större yta på ett linoleumgolv under 2 min. I en skolsal kan tex ett samlingsprov tas på golv, stolar och bord under 2 min.
9. Håll upp dammsugarmunstycket med provbehållaren och stäng av dammsugaren.
10. Kontrollera att det finns tillräckligt med damm i behållaren. Bör vara ca en tredjedel av nylonfiltrets längd. Om inte dammsug lite längre tid. Anteckna tiden.
11. Ta bort nylonfiltret/provbehållaren, som innehåller dammprovet och placera det i en liten plastpåse som försluts med blixtlås.
12. Märk provet väl med:
  - namn
  - datum
  - provplats
13. Lägg provbehållaren med provet i den medföljande plastpåsen tillsammans med blanketten Analysbeställning och **dammsugarmunstycket** i ett kuvert och skicka den till:  
Susanne Victor  
Arbets- och miljömedicin  
Akademiska sjukhuset  
751 85 Uppsala
14. Har du några frågor kring provtagningen  
ring Lena Elfman på: 018-611 36 53 alt 0733-46 11 13  
e-post: [lena.elfman@medsci.uu.se](mailto:lena.elfman@medsci.uu.se)  
eller Susanne Victor på: 018-611 36 55  
e-post: [susanne.victor@akademiska.se](mailto:susanne.victor@akademiska.se)

Arbets- och miljömedicin, Uppsala	Arbetsbeskrivn.: Insamling av dammprov med DUSTREAM™ för allergenbestämning					AB:PSA11b
Utarb. LE 12-01-31	Godkänd LE	Gäller från 12-11-08	Revision 4	Ersätter 120131	D:\_amm\_current\AB DammsugningDustream4.doc	Sid 1(1)